





# PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION DE MONITORES DE HEMODIÁLISIS

## UNIDAD DE HEMODIALISIS

### HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
EU. Florencia Toro Fuentes Supervisora Hemodiálisis EU. Verónica Cortez Gómez Encargada Calidad Hemodiálisis	Dr. Juan Esteban Romero Tomasevich Jefe Hemodiálisis
Fecha: 23.08.2012	Fecha: 23.08.2012
Firmas  	Firma 



	<b>PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION DE MONITORES DE HEMODIÁLISIS HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA</b>	<b>APD 1.3</b>
		<b>Fecha: 23 AGOSTO 2012</b>
		<b>Versión: 0</b>
		<b>Vigencia: 23 AGOSTO 2017</b>
		<b>Página 1 de 4</b>

## 1.- OBJETIVO

- Prevenir infecciones cruzadas entre pacientes que comparten máquinas de Hemodiálisis.
- Prevenir infecciones cruzadas por contaminación de superficie con aerosoles de fluidos corporales.

## 2.- ALCANCE


Aplica desinfección interna de máquinas de Hemodiálisis post procedimientos y a la realización de limpieza externa de máquina de Hemodiálisis

## 3.- DEFINICIONES

- **BIBAG:** Bolsa que contiene bicarbonato en polvo
- **Hanses:** Sistema hidráulico de máquina de Hemodiálisis que se conecta a filtro de paciente durante el procedimiento de Hemodiálisis.
- **Lavado Químico Calórico:** Corresponde a opción de desinfección que da la máquina de Hemodiálisis a 80ª de temperatura asociado a desinfectante de máquina de hemodiálisis.
- **Desinfectante de Máquina de Hemodiálisis:** Desinfectante de uso en máquinas de hemodiálisis con poder detergente, desincrustante, desinfectante fungicida, virucida

## 4.- RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO

- **Técnico Paramédico:** Responsable de realizar procedimiento
- **Enfermera Clínica:** Supervisar procedimiento
- **Enfermera Supervisora:** Evaluar cumplimientos y hacer intervenciones de mejoras

	<b>PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION DE MONITORES DE HEMODIÁLISIS HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA</b>	<b>APD 1.3</b>
		<b>Fecha: 23 AGOSTO 2012</b>
		<b>Versión: 0</b>
		<b>Vigencia: 23 AGOSTO 2017</b>
		<b>Página 2 de 4</b>

## 5.- DESARROLLO


### MATERIAL Y EQUIPO

- Guantes de procedimiento
- Bidón de Desinfectante de Máquina de Hemodiálisis conectado a máquina de hemodiálisis.

### PROCEDIMIENTO


#### Desinfección Interna de Máquina de Hemodiálisis

- Aplicar precauciones estándar
- Verificar que Enfermera ha desconectado paciente de máquina de hemodiálisis.
- Vaciar BIBAG.
- Retirar pipeta de ácido y conectar a máquina de hemodiálisis en cámara de lavado.
- Desconectar bibag de máquina y cerrar dispensador
- Desconectar hanes y conectar a máquina de hemodiálisis.
- Desmontar sistema.
- Presionar tecla desinfección
- Seleccionar Desinfección Caliente.
- Espere a que máquina alarme desinfección concluida (el proceso toma 30 minutos).
- Una vez finalizada la desinfección se puede iniciar preparación de máquina para próximo paciente

	<b>PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION DE MONITORES DE HEMODIÁLISIS HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA</b>	<b>APD 1.3</b>
		<b>Fecha: 23 AGOSTO 2012</b>
		<b>Versión: 0</b>
		<b>Vigencia: 23 AGOSTO 2017</b>
		<b>Página 3 de 4</b>

### **Desinfección Externa de Máquina de Hemodiálisis**

- Aplicar precauciones estándar.
- Empapar dos paños desechables con alcohol 70 °.
- Limpiar desde la parte más alta hacia abajo todas las superficies de máquina.
- Poner especial cuidado en panel de control de ambos módulos y Hansen
- Repetir procedimiento con segundo paño
- Retirar guantes de procedimientos
- Lavado clínico de manos
- Los días Lunes en cuarto turno, técnico paramédico deberá limpiar la parte posterior de la máquina y los soportes. El cumplimiento de este procedimiento será supervisado por Enfermera de turno.

	<b>PROCEDIMIENTO DE DESINFECCION DE MONITORES DE HEMODIÁLISIS HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA</b>	<b>APD 1.3</b>
		<b>Fecha: 23 AGOSTO 2012</b>
		<b>Versión: 0</b>
		<b>Vigencia: 23 AGOSTO 2017</b>
		<b>Página 4 de 4</b>

## 6.- REGISTROS

No Aplica.

No se registra pero la máquina por seguridad no permite reiniciar proceso

## 7.- INDICADOR

No aplica

## 8.- REFERENCIAS

Manual de Procedimientos Unidad Hemodiálisis Hospital Regional Rancagua.

Normas Prevención Infecciones en Hemodiálisis.

Manual de máquinas de hemodiálisis Fresenius 4008/S

## 9.- REVISION Y CONTROL DE CAMBIOS

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Aprobación</b>
23 Agosto 2012	Se libera para su uso	Dr. Juan Romero Tomasevich Jefe de Servicio

## 10.- ANEXO

No aplica